

Gebrauchsanweisung/ Instructions for use/ Manuel d'instruction/ Manuale d'istruzioni/ Manual de instrucciones/  
Instrukcja obsługi/ Bruksanvisning/ Instruksjoner for bruk/ Käyttöohjeet/ Gebruiksaanwijzing/ Εγχειρίδιο οδηγιών/  
Upute za korištenje/ Manual de instrucțiuni/ Instrukcija/ Návod k použití/ Návod na použitie/ Használati utasítás

## CopraTemp

Basis UDI-DI: ++EWPDCCKTLL



|                                   |                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produttore</b>                 | Whitepeaks Dental Solutions GmbH<br>Alfredstr. 81 - 45130 Essen – Germania<br><b>SRN: DE-MF-000021120</b>                                                        |
| <b>Prodotto/ Tipo di prodotto</b> | PMMA Blanks per la fabbricazione di protesi e stecche temporanee e permanenti                                                                                    |
| <b>Forma del prodotto</b>         | Dischi di diverse dimensioni e colori                                                                                                                            |
| <b>Tipo di materiale</b>          | Polimetilmetacrilato (PMMA)<br>- materiale per corone e rivestimenti a base di polimeri tipo 2 classe 1 secondo DIN EN ISO 10477 - dispositivo medico classe IIa |
| <b>Gruppo di utenti</b>           | Utenti addestrati che fabbricano restauri dentali / stecche                                                                                                      |

### Indicazione/uso previsto

CopraTemp è adatto esclusivamente alla fabbricazione di prodotti dentali:  
Protesi temporanee o permanenti, così come stecche. CopraTemp è certificato per l'uso nella cavità orale e può rimanere in bocca per un breve periodo o in modo permanente.

CopraTemp è un dispositivo medico destinato alla fabbricazione di protesi dentarie/splint destinati all'uso temporaneo o a lungo termine, che sono parzialmente inseriti nel corpo umano mediante una procedura clinica, ma in questo caso sono collocati nei denti o fissati alla struttura del dente mediante cemento e sono quindi di classe IIa.

### CopraTemp A1, A2, A3, B1 e CopraTemp Symphony A1, A2, A3, B1

I prodotti di colore dentale CopraTemp A1, A2, A3, B1 e CopraTemp Symphony A1, A2, A3, B1 sono adatti alla realizzazione di corone temporanee, ponti, inlay, onlay, ecc. che vengono poi sostituiti dal restauro definitivo. Tuttavia, è possibile anche una ritenzione permanente nella cavità orale come restauro permanente.

### CopraTemp Clear

CopraTemp Clear è incolore e viene utilizzato per la fabbricazione di stecche. La ritenzione permanente nella cavità orale è indicata.

### CopraTemp Base C + V

Il prodotto di colore rosa CopraTemp Base è adatto alla fabbricazione di basi per protesi, che vengono poi sostituite dalla protesi definitiva. Tuttavia, è possibile anche una ritenzione permanente nella cavità orale come restauro permanente.

### Controindicazione

Non utilizzare in caso di comprovata ipersensibilità contro uno dei componenti.

### Proprietà dei materiali/ datitecnici